

シールドマスク

材料（1人用）

・プラバン（A4サイズ）	1/4カット
・書類とじ（15本入り）	1本
・マスクゴムまたはバイアステープなど	数センチ×2
・メモスタンド（縦置き横置き対応）	1個

必要な道具

・ドライヤー
・ドライバードリルまたは千枚通しなど
・穴あけパンチ
・かどまるくん
・ハサミ
・カッター
・スケール（定規）

作り方

- ①書類とじの両端に耳掛けゴム通し用の穴を2つずつ開けます
- ②ドライヤー（HOT）を書類綴じに当てます
- ③書類とじが温かくなってきたら少しずつ曲げていきます
- ④全体に温風を当てながら緩やかにカーブを付けます
※顎全体を広くカバーするくらいのカーブ
- ⑤耳掛けゴム通し用の穴にマスクゴムを通します
- ⑥プラバンを4分の1にカットします
- ⑦穴あけパンチで穴をあけます
※横向き
- ⑧プラバンの角をかどまるくんでカットします

⑨書類とじとプラバンを組み合わせます

⑩カーブの内側にあるフレームにメモスタンドを取り付けます

Point

- ステンレスフレーム（穴あき）があるとカーブをつける台座（型）に
使えます
- メモスタンドの代わりに、メラミンスポンジとシリコンシートを使って
部品を作るとさらに軽量化が図れます
- すべて分解可能なので、パーツごとに洗浄でき、衛生的です

